



KÄYTTÖOHJE

Digitaalinen stetoskooppi



Omplyn digitaalisen stetoskoopin avulla sydän-, keuhko- ja suolistoäänien kuunteleminen kotona on helppoa ja turvallista. Stetoskoopilla kuuntelemalla voidaan havaita normaalit äänet sekä sairauden yhteydessä esimerkiksi hengityksen vinkunat ja rahinat tai sydämen sivuäänet ja rytmihäiriöt. Äänet välittyvät automaattisesti sovellukseen ja lääkärisi kuule ne reaaliaikaisesti.

Stetoskoopin yhdistäminen puhelimeen

- Käynnistä stetoskooppi painamalla virtanappia pohjaan muutaman sekunnin ajan.
- Laite yhdistyy automaattisesti puhelimeen ja sovellukseen.
- Kytke omat kuulokkeet halutessasi laitteeseen (AUX-liitäntä) kuullaksesi itse sydän- ja keuhkoäänet.
- Stetoskooppia tulee käsitellä rauhallisesti.
- Ota tukevasti kiinni kaikilla viidellä sormella laitteen mustasta yläosasta.
- Paina sininen kuunteluosa haluttuun kuuntelu kohtaan tukevasti ja vältä sormien liikuttelua kesken kuuntelun.



Tutkimuksen aikana ja jälkeen

- Lääkäri ohjeistaa aina siinä, mihin kohtaan stetoskooppi tulee asettaa ja milloin paikkaa vaihdetaan.
- Kuuntelun päätyttyä sammuta laite painamalla virtanappia, kunnes näytölle tulee ilmoitus sammutuksesta.
- Stetoskooppi toimii ladattavalla akulla, ja sen voi ladata mukana tulevalla Micro-USB-kaapelilla.

