



KÄYTTÖOHJE

# Pulssioksimetri




Omplyn avulla veren happipitoisuuden mittaaminen kotona on yksinkertainen ja luotettava tapa selvittää, kuinka hyvin keuhkosi siirtävät happea vereen ja kuinka tehokkaasti sydän pumppaa verta kehon eri osiin. Mittaus on turvallista ja tulokset tallentuvat automaattisesti sovellukseen, josta voit jakaa ne suoraan lääkärillesi.

Varmista ennen mittausta, että kätesi ovat puhtaat ja lämpimät. Kylmät tai likaiset sormet voivat heikentää mittaustarkkuutta. Kynsilakka, erityisesti tummat tai metalliset sävyt, voivat vääristää mittaustulosta tai estää mittauksen kokonaan. Myös teko- tai geelilakka voi vaikuttaa, koska se voi estää valon pääsyn kynnen läpi. Ennen mittausta istu rauhassa ja lepää noin minuutin ajan, jotta verenkierto tasaantuu.

## Pulssioksimetrin yhdistäminen puhelimeen

- Avaa pulssioksimetri saranapäädystä.
- Aseta pulssioksimetri sormeesi niin, että kynsi osoittaa ylöspäin ja sormenpää asettuu mittausalueen keskelle.
- Käytä etusormea tai keskisormea.
- Laite käynnistyy, mittaa ja sammuu automaattisesti.

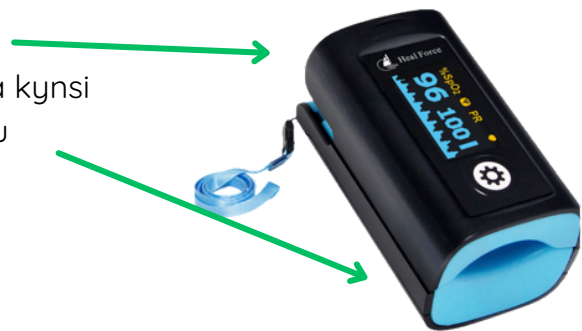

## Tutkimuksen aikana ja jälkeen

- Mittauksen aikana vältä puhumista ja liikkumista.
- Laite piippaa tasaisesti mittauksen ajan, ja tulos valmistuu alle minuutissa.
- Tulos siirtyy automaattisesti Omply-sovellukseen. Jos olet mittauksen aikana yhteydessä lääkäriin, hän näkee mittaustulokset reaaliajassa.
- Mittauksen jälkeen poista laite sormestasi ja se sammuu itsestään.

